

■吃音克服訓練支援サービス「フルーエントーク」とは

インターネットを通じて、吃音症状改善の訓練ができるサービスを提供します。重度から中軽度まで、幅広い吃音症状を想定した段階訓練を用意しています。施設(法人)でのご利用にも、個人でのご利用にもお使いいただけます。

■吃音克服訓練支援サービス「フルーエントーク」の特長





- ① インターネット接続できるパソコンがあれば、いつでも、どこでも訓練をご利用いただけます。
- ② 吃音の改善には、長期にわたる定期的な繰返し訓練が必要です。病院、学校で指導を受けながら、あるいは個人宅でじっくりと、本サービスの訓練を継続することができます。
- ③ 年額(個人向けには半年も可)で、病院、学校でもご利用できます(インストール等不要)。お申し込みいただくと、訓練を利用するためのID・パスワードを発行いたします。
- ④ 訓練中の声が録音できるので、症状の確認に役立てることができます。
- ⑤ 周波数調整器・振動子(別売)と併用して「低周波刺激」、「不連続刺激」及び「リズム訓練」などの訓練ができます。(オプション機器による効果的な訓練)
- ⑥ Androidアプリ「ポケットリズム」と併用して、リズムを取りながら話しことば訓練ができます。

■訓練画面のご紹介

訓練選択画面(全5ステップ)

基礎訓練		吃音訓練		
		訓練の速さ: ○ 遅い ● ふつう ● 速い		
ステップ1 母音・子音	ステップ2 4行となえうた	ステップ3 小児・成人I	ステップ4 成人II	ステップ5 百人一首
フル訓練モード	フル訓練モード	フル訓練モード	フル訓練モード	フル訓練モード
選択訓練モード	選択訓練モード	選択訓練モード	選択訓練モード	選択訓練モード
おまかせモード	おまかせモード	おまかせモード	おまかせモード	おまかせモード
15分 30分 45分	15分 30分 45分	15分 30分 45分	15分 30分 45分	15分 30分 45分

◆基礎訓練:ステップ1(母音・子音), ステップ2(4行となえうた)

			
戻 前 次 休	次 休	戻 次 休	戻 休

ステップ1「あ」の訓練

ステップ1「ふ」の訓練

ステップ2「あ」の訓練

ステップ2「か」の訓練

◆吃音訓練(リズムとなえうた):ステップ3(小児・成人I), ステップ4(成人II), ステップ5(百人一首)

		
あさ おきたら 秋 だった。セミの なく声 どこいったの? 風が すーと しらんぷり してた。そらが うーんと とおくに いった。 秋せん とつぜん くるんだ ね。	1.笑顔 もっとも 簡単な 挨拶 は、何を 言うより 表情 です。ね。 ことば より ずっと もっと 的確 大事な ことば です。 急に 笑顔が 作れ なくても、表情 に 気をはる だけでも おおいに 全く 遅い ます。	4番歌 山辺赤人 田子の浦にうち出でて見れば白妙の 富士の高嶺に雪は降りつつ たごのうら に うちいでて みれば しるたへ の ふじの たかねに ゆきは ふりつつ
戻 次 休	戻 次 休	戻 次 休

ステップ3「秋」の訓練

ステップ4「笑顔」の訓練

ステップ5「4番歌」の訓練

■訓練ステップ、内容

訓練ステップ		訓練内容	訓練速度	訓練コンテンツ数
基礎訓練	ステップ1	母音・子音訓練	—	40訓練
	ステップ2	4行となえうた訓練	—	115訓練
吃音訓練	ステップ3	リズムとなえうた訓練(小児・成人Ⅰ)	遅い、ふつう、速い	100訓練
	ステップ4	リズムとなえうた訓練(成人Ⅱ)	遅い、ふつう、速い	100訓練
	ステップ5	リズムとなえうた訓練(百人一首)	遅い、ふつう、速い	100訓練

■訓練モード

訓練モード	説明
フル訓練(全訓練)	ステップ1～5の各ステップ内の全訓練を通しておこなう訓練
選択訓練	各ステップ内の特定の訓練を選択しておこなう訓練
おまかせ	各ステップ内の訓練を、時間を指定してランダムな内容でおこなう訓練 (15/30/45分間の3コース)

■病院・学校(法人)向けサービス利用料

ご利用訓練者数(最大アカウント数)	10人未満	10人以上
ご利用期間	1年間(1年ごとに更新可能)	
ご利用料	¥21,000	¥42,000

■くつろぎコンテンツ

くつろぎの種類	練習数
歌の練習	3種
俳句の練習	12種
詩の練習	4種
色の世界	16種
花の世界	20種

■個人向けサービス利用料


ご利用期間(更新可能)	1年間	6ヶ月間
ご利用料	¥21,000	¥12,600

■オプション機器価格

オプション機器	定価
周波数調整器ユニット1式 (周波数調整器、振動子、ヘッドセット)	¥84,630

■周波数調整器ユニット

外形mm
45(W)x120(H)x85(D)

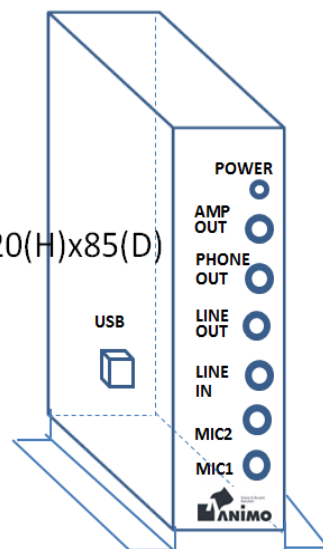

■動作環境

OS対応	Microsoft Windows Vista、7、8 32/64bit OS
ブラウザ	Microsoft Internet Explorer 7.0以上 Adobe Flash Player 9以降必須

- 本サービスは、独立行政法人情報通信研究機構様のチャレンジド向け通信・放送役務提供・開発推進助成金を得て開発したものです。
- 指導・監修:新潟リハビリテーション大学 教授 道関京子

◆企画・製作・販売 株式会社アニモ



〒231-0015 横浜市中区尾上町2-27 大洋建設関内ビル4F

TEL:045-663-8640 FAX:045-663-8627

URL: <http://www.animo.co.jp> E-mail: sales@animo.co.jp

◆アニモ販売代理店 株式会社KDS



〒410-0018 沼津市豊町5-1

TEL & FAX:055-920-3930

URL: <http://www.kds-jpn.co.jp>

営業担当:河合

E-mail: ikawai@kds-jpn.co.jp